

## Förändring av provtagningsset för faeces vid Klinisk mikrobiologi



Från och med den 15 april ska FecalSwab (artikelnummer 7755) användas vid faecesprovtagning för tarmpatogena virus och bakterier. Det innebär att analys för tarmpatogena virus och bakterier kan beställas på samma rör.

Observera att FecalSwab inte kan användas vid analys av *clostridioides difficile*, *helicobacter pylori*-antigen och parasitfrågeställningar. För dessa analyser gäller provtagning som tidigare.

Provtagning med FecalSwab skiljer sig en del från tidigare faecesprovtagning, se beskrivning nedan.

- 
- *Samla avföring på provtagningspinnen från till exempel desinficerat bäcken, blöja eller från toapapper. Pinnen ska endast vidröra avföring, pinnen ska ej gnuggas mot till exempel toapapper. Det ska vara en synlig mängd avföring på pinnen, ungefärlig mängd enligt bilden. Alternativ vid vattentunna diarréer: Stryk pinnen mot ändtarmsöppningen direkt efter avföring.*
  - *Placera provtagningspinnen i röret. Kontrollera att den svarta linjen för maximal fyllnad ej överskrids. Om den svarta linjen överskrids, ta nytt prov med nytt provtagningsset.*
  - *Med röret riktat bort från dig, bryt av pinnen vid den röda markeringen och låt spetsen vara kvar i röret. Förslut röret noga med den gröna korken.*
  - *Skaka röret så att provet fördelas jämnt i röret.*
- 



Uppdaterade provtagningsanvisningar och patientinstruktioner finns i provtagningsanvisningarna. Se till att skriva ut nya patientinstruktioner för att kunna ge till patienter som tar provet själva.

Vid frågor; kontakta laboratorieinstruktör Elin Johansson som nås på [elin.a.johansson@regionvasterbotten.se](mailto:elin.a.johansson@regionvasterbotten.se) eller [090-785 18 22](tel:090-7851822).