



Anatomic
-SITT-



Monteringsguide för positioneringshjälpmedel

Förslag på hur du monterar vår
Support-serie på

**EL - RULLSTOLAR
& ARBETSSTOLAR**

2020-11-18

I denna guide finner du våra rekommendationer på hur du kan montera våra bälten och selar i olika på marknaden förekommande elektriska rullstolar och arbetsstolar.


Observera att du alltid ska använda rullstolstillverkarens rekommendationer och instruktioner! Kontrollera även om kombinationsavtal finns mellan rullstolstillverkaren och Anatomic Sitt AB (se www.anatomic sitt.se).

Bilderna och instruktionerna i denna guide är våra rekommendationer och monteringar kan behöva ändras efter användarens behov.

INNEHÅLL

Spännen	3	LB Medical	
Monteringstillbehör	4	iChair MC1/MC2/MC3/MCS.....	20
Invacare		Ortocar.....	22
Modulite på Bora, TDX, Kite, Aviva...	6	Sunrise	
Storm 3.....	7	Sterling Opal.....	23
Storm 4.....	8	Eurovema	
Orion.....	10	Miniflex 500.....	24
Permobil		Minicrosser	
C400/X850/3G/F3/F5/M400.....	12	M1.....	26
K300.....	14		
Koala.....	16		
Arbetsstol Mercado			
9000 / 6100.....	18		

Triglide-metoden

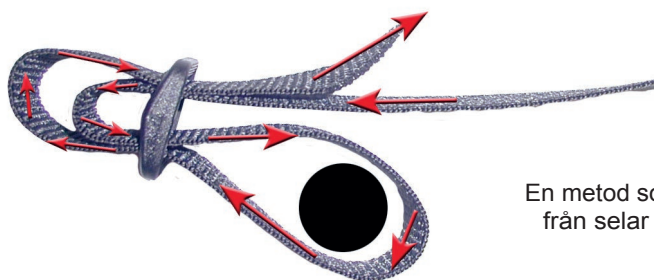

Triglide

En metod som används för att fästa band från selar och bälten med hjälp av ett Triglide-spänne

Spännen till höftbälten

För 25 mm band



Spänne DWSR25
Bandbredd: 25 mm
Åtdrag: Dubbel
Art.nr: 211745



Spänne 725
Bandbredd: 25 mm
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211725



Spänne 325
Bandbredd: 25 mm
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211325



Spänne Chromeline
Bandbredd: 25 mm
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211107



Säkerhetskåpa till Chromeline
Art.nr: 211108

För 40 mm band



Spänne DWSR40
Bandbredd: 40 mm
Åtdrag: Dubbel
Art.nr: 211746



Spänne 740
Bandbredd: 40 mm
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211740



Spänne 340
Bandbredd: 40 mm
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211340



Spänne S40
Bandbredd: 40 mm
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211140



Spänne 742
Bandbredd: 40 mm
Åtdrag: Dubbel
Art.nr: 211742



Spänne Billås
Bandbredd: 40 mm
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211101



Säkerhetskåpa till Billås
Art.nr: 211109



Flygplansspänne
Bandbredd: 40 mm
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211106



Spänne M2
Bandbredd: 40 mm
Åtdrag: Enkel
Art.nr: 211752



Säkerhetslock till M2
Art.nr: 211753

Olika spännen lämpar sig för olika typer av åtdrag

Enkeldrag

Dubbeldrag



Monteringstillbehör - Bälten & Selar

För 25 mm band



Art nr 371912

Universalfäste Support
- höftbälten 25 mm,
M6 (2 st)



Art nr 371913

Universalfäste Support
- höftbälten 25 mm,
M8 (2 st)



Art nr 371916

Universalfäste Support
- 25 mm (2 st)
(klämman passar
19, 22 och 25 mm rör)



Art nr 371910

Universalfäste Support
- höftbälten 25 mm,
M6 (4 st)



Art nr 371911

Universalfäste Support
- höftbälten 25 mm,
M8 (4 st)



Art nr 371917

Universalfäste Support
- 25 mm (4 st)
(klämman passar
19, 22 och 25 mm rör)

För 40 mm band



Art nr 387

Universalfäste support
höftbälten 40 mm,
M6 (2 st)



Art nr 386

Universalfäste Support
- höftbälten 40 mm,
M8 (2 st)



Art nr 371918

Universalfäste Support
- 40 mm (2 st)
(klämman passar
19, 22 och 25 mm rör)



Art nr 211015 Triglidespänne 15 mm

Art nr 211020 Triglidespänne 20 mm

Art nr 211025 Triglidespänne 25 mm

Art nr 211040 Triglidespänne 40 mm



Art nr 3715

Förlöjningsstag till
25 mm
band, fast rygg



Art nr 371901

Förlöjningsstag juster-
bara, till 25 mm band,
fast rygg



Art nr 371907

Förlöjningsstag juster-
bara, till 25 mm band,
klämfäste



Art nr 371908

Förlöjningsstag
justerbara, till 25 mm
band, 60 mm infästning



Art nr 385234

Övre beslag sele
(Universal 16x16
passar alla Zitzi nack-
stöd)



Art nr 152238

Övre monteringsbeslag,
lång (För montering på
Delfi Pro/Sharky Pro/
Carseat & Active)



Art nr 211325

Spänne 325
för bandbredd 25 mm
(typ Fixlock)



Art nr 371903

Fäste - förlöjningsstag,
justerbar
(ingår i 371901)



Art nr 790301 FMK stl. 1

Art nr 790302 FMK stl. 2

Art nr 790303 FMK stl. 3

FMK® - Fäste mellan körhandtag

FMK (fäste mellan körhandtag) är en universal monteringssett för att underlätta montering av bälsele och huvudstöd. Monteras runt rullstolens körhandtag eller ryggrör. Används även för att få rätt dragriktning för övre infästningen av positioneringsstöden.

FMK finns i 3 olika storlekar:

- Storlek 1 passar ett röravstånd på 22-42 cm
- Storlek 2 passar ett röravstånd på 32-52 cm
- Storlek 3 passar ett röravstånd på 42-62 cm

Passar till rörtjocklekarna 20, 22 och 25 mm.


Förlöjningsstag att använda tillsammans med FMK finns för både 25 mm och 40 mm band. Fäste för Anatomic huvudstödet ingår som standard.

FMK är avtagbart utan verktyg.

2-punkts Höftbälte

Alt. (A) Anatomic Sitts universalfäste 387 monteras i skruvförbandet till ryggstödsbeslaget enligt bild (A). Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Alt. (B) Anatomic Sitts universalfäste 387 monteras i sittsystemets skena enligt bild (B). Använd Invacares T-mutter. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

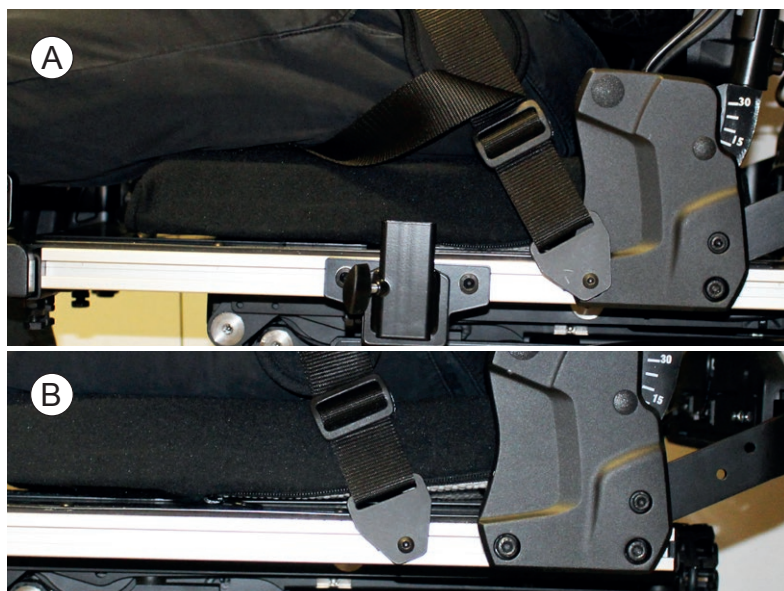

Monteringstillbehör



Art nr 387
Universalfäste support
höftbälten 40 mm,
M6 (2 st)



Triglide-spännen som
medföljer bältet



Invacare: T-mutter M6
artikelnr. SP1573721 (2st)

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Alt. (C) Anatomic Sitts universalfäste 371910 monteras i skruvförbandet till armstödsbeslaget resp. ryggstödsbeslaget enligt bild (C). Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Alt. (D) Anatomic Sitts universalfäste 371910 monteras i sittsystemets skena enligt bild (D). Använd Invacares T-mutter. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 371910
Universalfäste Support
höftbälten 25 mm,
M6 (4 st)



Triglide-spännen som
medföljer bältet



Invacare: T-mutter M6
artikelnr. SP1573721 (4st)

Bålsele

Nedre banden: Trä selens nedre banden runt ryggröret och använd Triglides-metoden med spännet som medföljer bältet.

Övre banden: Trä selens övre band genom skåran i fästet och använd Triglides-metoden med spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör

Invacares - Övre fäste
för sele 1559963
Monteras på
nackstödet



Triglides-spännen som medföljer selen.

Vrifthållare och Fotremmar

Vrifthållare och fotremmar kan monteras på fotplattor med förberedda skruvhål eller spår. Om det inte finns krävs specialanpassning (t.ex. för centralt placerade benstöd enl. bild A).

På vissa nya modeller av benstöd kan ev. montering ske enligt nedan.



Vrifthållare monteras på fotplattan med en rem genom yttre spåret i fotplattprofilen och ett triglide-spänne. På andra sidan skruvas bandet fast i det befintliga skruvhålet.



Triglides-spännen som medföljer vrifthållaren.



Fotremmen monteras på fotplattan med bandet genom yttre spåret i fotplattprofilen och runt under fotplattan.

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Anatomic Sitts universalfästen 371910 skruvas i sittramens skruvhål enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 371910
Universalfäste Support
höftbälten 25 mm,
M6 (4 st)



Triglide-spännen som medföljer bältet.



4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Främre bandet: Trä främre bandet till höftbältet runt fästet för armstödet enl. bild och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Bakre bandet: Anatomic Sitts universalfästen 371912 skruvas i sittramens skruvhål enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Monteringstillbehör



Art nr 371912
Universalfäste Support
höftbälten 25 mm,
M6 (2 st)



Triglide-spännen som medföljer bältet.



2-punkts Höftbälte

Anatomic Sitts universalfäste 387 monteras i beslaget vid armstödsfästet enligt bild (A). Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 387
Universalfäste support
höftbälten 40 mm,
M6 (2 st)



Triglide-spännen som
medföljer bältet.

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Bakre bandet: Trä höftbältet runt längst ner ryggröret och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371912 monteras i beslaget vid armstödsfästet enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 371912
Universalfäste Support
- höftbälten 25 mm,
M6 (2 st)



Triglide-spännen som
medföljer bältet.

Bålsele

Nedre banden: Trä selens nedre banden runt ryggröret (se bild A) och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer selen.

Övre banden: Använd Anatomic Sitts - Fäste Mellan Körhandtag (FMK) och Förhöjningsstagen som monteras på ryggröret enligt bild B. Trä och lås selens övre band i förhöjningsstagens fixlock.



Monteringstillbehör



Anatomic Sitt
art.nr. 790301
FMK stl. 1



art.nr. 790306
Förhöjningsstag för 25
mm band (2 st)



Triglide-spännen som medföljer selen.

Vrifthållare och Fotremmar

Våra vrifthållare och fotremmar kan ej monteras på fotplattan utan specialanpassning

2-punkts Höftbälte

Anatomic Sitts universalfäste 387 fästs i sittramens profil enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 387
Universalfäste support
bälten 40 mm,
M6 (2 st)



Triglide-spännen som
medföljer bältet.

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371910 fästs i sitt-ramens profil enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Bakre bandet: Använd Anatomic Sitts universalfäste 371910 som fästs i sittramens profil enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 371910
Universalfäste Support
höftbälten 25 mm,
M6 (4 st)



Triglide-spännen som medföljer bältet.

Bålsele

Nedre banden: Använd befintligt hål på ryggstödet och montera Anatomic Sitts spänne 325 enligt bild (A). Trä selens nedre band under ryggen och fixera dom i spännet.

Övre banden: Använd befintliga Unitrac-skena på ryggstödet och montera Anatomic Sitts spänne 325 enligt bild (B). Använd försänkt skruv och Permobils fyrkantmutter. Trä selens nedre band under ryggen och fixera dom i spännet.



Monteringstillbehör



2 st art.nr. 211325
Spänne 325
för 25 mm band



Försänkt skruv
4 st M6x10mm



Permobil fyrkantmutter
M6 (2st)



2 st Spänne 325 medföljer selen.

Vrifthållare och Fotremmar

Våra vrifthållare och fotremmar kan ej monteras på fotplattan utan specialanpassning

2-punkts Höftbälte

Anatomic Sitts universalfäste 387 fästs i sittramens profil enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 387
Universalfäste support
höftbälten 40 mm,
M6 (2 st)



Triglide-spännen som
medföljer bältet.

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371910 fästs i sitt-ramens profil enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd Triglide-metoden med spännet som medföljer höftbältet.

Bakre bandet: Använd Anatomic Sitts universalfäste 371910 som fästs i sittramens profil enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 371910
Universalfäste Support
bälten 25 mm,
M6 (4 st)




Triglide-spännen som medföljer bältet.

Bålsele

Nedre banden: Använd Anatomic Sitts universalfäste 371912 som monteras i ryggstödet profilskena enligt bild. Använd bricka, kortare skruv och Permobil's fyrkantmutter. Trä selens nedre band under ryggen och använd fästmetoden med triglide-spännet som fedföljer selen.

Övre banden: Använd Anatomic Sitts övre monteringsbeslag 152238 som monteras i ryggstödet profilskena enligt bild (A). Använd bricka, kortare skruv och Permobil's fyrkantmutter. Trä selens övre band genom beslaget och lås fast i befintlig fixlock enligt bild (B).

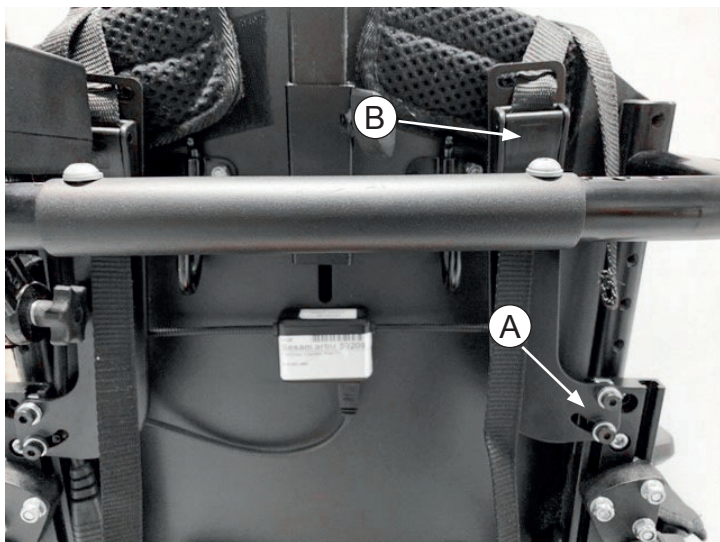

Monteringstillbehör



Art nr 371912
Universalfäste Support
- höftbälten 25 mm,
M6 (2 st)



Art nr 152238
Övre monteringsbeslag,
lång



Permobil fyrkantmutter
M6 (2st)



Triglide-spännen som medföljer bältet.


Vrifthållare och Fotremmar

Våra vrifthållare och fotremmar kan ej monteras på fotplattan utan specialanpassning

2-punkts Höftbälte

Alt. 1: Använd Anatomic Sitts universalfäste 387 fästs i ryggstödsfästets skruvförband enligt bild (pos A). Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Alt. 2: Anatomic Sitts universalfäste 387 fästs i armstödsfästets skruvförband på sittramen vid pos B. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

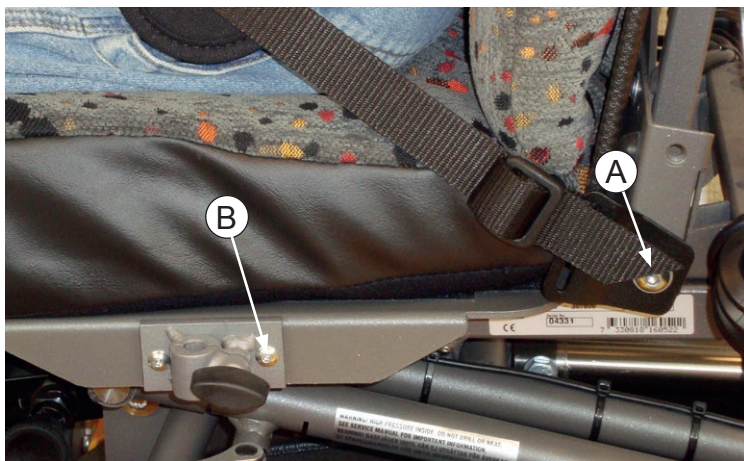

Monteringstillbehör



Art nr 387
Universalfäste support
höftbälten 40 mm,
M6 (2 st)



Triglide-spännen som
medföljer bältet.

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371910 fästs i armstödsfästets skruvförband på sittramen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Bakre bandet: Använd Anatomic Sitts universalfäste 371910 fästs i ryggstödsfästets skruvförband enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer höftbältet.



Monteringstillbehör



Art nr 371910
Universalfäste Support
höftbälten 25 mm,
M6 (4 st)



Triglide-spännen som medföljer bältet.

Bålselar, vrishållare och fotremmar

Våra produkter kan inte monteras på denna stol utan specialanpassningar.

Bålsele

Nedre banden: Trä selens nedre band runt fyrkantröret under sitsen (se bild A) och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer selen.

Övre banden: Använd befintliga hål på ryggstödet och montera Anatomic Sitts universalfäste enligt bild (B). Trä selens övre band över ryggen och fixera dom i 325-spännet enligt bild (B) eller använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer selen.



Art nr 371912
Universalfäste
Support - höftbälten
25 mm, M6 (2 st)



2 st 325-spännen
som medföljer selen



Triglide-spännen som medföljer selen

Vrifthållare och Fotremmar

Våra vrifthållare och fotremmar kan ej monteras på fotplattan utan specialanpassning

2-punkts Höftbälte

Anatomic Sitts universalfäste 387 skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 387
Universalfäste support
höftbälten 40 mm,
M6 (2 st)



Triglide-spännen som
medföljer bältet.



4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371910 skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Bakre bandet: Använd Anatomic Sitts universalfäste 371910 som skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.




Monteringstillbehör



Art nr 371910
Universalfäste Support
höftbälten 25 mm,
M6 (4 st)




Triglide-spännen som medföljer bältet.

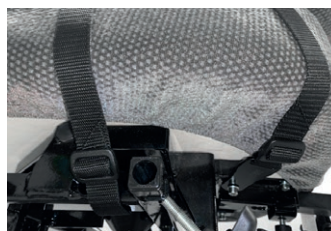

Bålsele

Bålsele kan monteras med Mercados monteringsset HB2540. Använd monteringsseten och följ leverantörens instruktioner. Trä sedan selarnas övre och nedre band genom beslagen och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer selen.

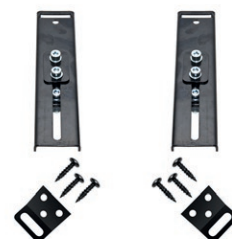

Mercado
art nr HB2540
H-selefasten med
skruvar



Triglide-spännen som medföljer selen

Vrifthållare och fotremmar

Vrifthållare och fotremmar kan montera på de fotplattor som har befintliga spår.



2-punkts Höftbälte

Anatomic Sitts universalfäste 386 skruvas i ett av befintliga skruvhål i sitsramen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 386
Universalfäste support
höftbälten 40 mm,
M8 (2 st)




Triglide-spännen som
medföljer bältet.

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371911 skruvas i ett av befintliga skruvhål i sitsramen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Bakre bandet: Använd Anatomic Sitts universalfäste 371911 som skruvas i ett av befintliga skruvhål i fästplattan till ryggen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

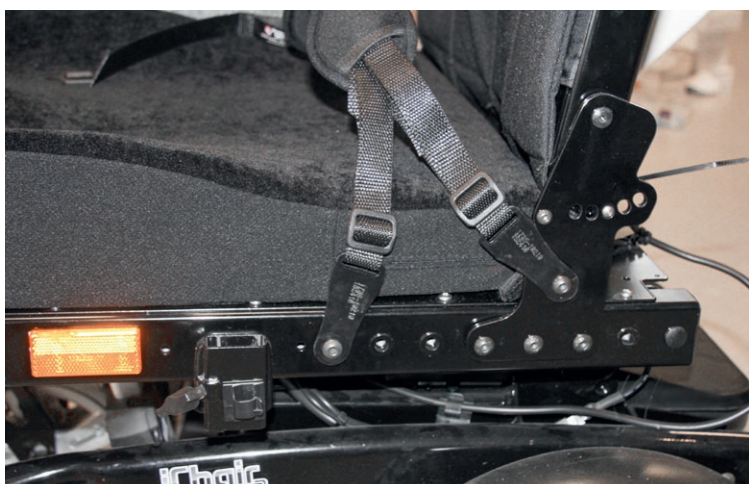

Monteringstillbehör



Art nr 371911
Universalfäste Support
höftbälten 25 mm,
M8 (4 st)




Triglide-spännen som medföljer bältet.

Bålsele

Övre banden: Anatomic Sitts universalfäste 371916 fästes med rörlämma i körhandtaget enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Nedre banden: Använd Anatomic Sitts universalfäste 371913 som skruvas i ett av befintliga skruvhål i fästplattan till ryggen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

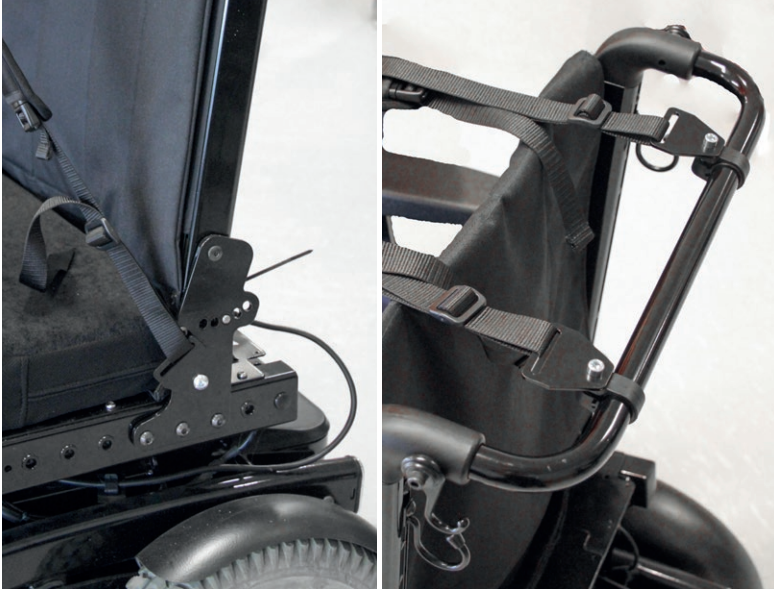

Monteringstillbehör



Art nr 371916
Universalfäste Support
- 25 mm (2 st)
(klämman passar
19, 22 och 25 mm rör)



Art nr 371913
Universalfäste Support
-höftbälten 25 mm,
M8 (2 st)



Triglide-spännen som medföljer bältet.

Vrifthållare och Fotremmar

Våra vrifthållare och fotremmar kan ej monteras på fotplattan utan specialanpassning

2-punkts Höftbälte

Anatomic Sitts universalfäste 386 skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 386
Universalfäste support
höftbälten 40 mm,
M8 (2 st)



Triglide-spännen som
medföljer bältet.

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371911 skruvas i ett av befintliga skruvhål på sidan av sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Bakre bandet: Använd Anatomic Sitts universalfäste 371911 som skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 371911
Universalfäste Support
höftbälten 25 mm,
M8 (4 st)



Triglide-spännen som medföljer bältet.

Bålselar, vrifthållare och fotremmar

Våra produkter kan inte monteras på denna stol utan specialanpassningar.

2-punkts Höftbälte

Anatomic Sitts universalfäste 387 skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 387
Universalfäste support
höftbälten 40 mm,
M6 (2 st)



Triglide-spännen som
medföljer bältet.

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371910 skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Bakre bandet: Använd Anatomic Sitts universalfäste 371910 som skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 371910
Universalfäste Support
höftbälten 25 mm,
M6 (4 st)



Triglide-spännen som medföljer bältet.

Bålselar, vrifthållare och fotremmar

Våra produkter kan inte monteras på denna stol utan specialanpassningar.

2-punkts Höftbälte

Anatomic Sitts universalfäste 387 fästs i sittplattans undersida i befintliga islagsmuttrar enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 387
Universalfäste support
höftbälten 40 mm,
M6 (2 st)



Triglide-spännen som
medföljer bältet.



4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371910 fästs i sittplattans undersida i befintliga islagsmuttrar enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Bakre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371910 fästs i sittplattans undersida i befintliga islagsmuttrar enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 371910
Universalfäste Support
höftbälten 25 mm,
M6 (4 st)



Triglide-spännen som medföljer bältet.



Bålsele

Vår bålsele kan inte monteras på standardryggen utan specialanpassning.
Beskrivningen nedan gäller för Slingback-ryggen där selen kan monteras på körbågen.

Övre banden: Anatomic Sitts universalfäste 371916 fästes med rörklämma i körhandtaget enligt bild. Trä selen genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer selen.

Nedre banden: Anatomic Sitts universalfäste 371912 skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. Trä selen genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer selen.



Monteringstillbehör



Art nr 371912
Universalfäste Support
- höftbälten 25 mm,
M6 (2 st)



Art nr 371916
Universalfäste Support
- 25 mm (2 st)
(ingående klämma
passar 19, 22 och 25
mm rör)



Triglide-spännen som medföljer selen.

Vrifthållare och Fotremmar

Våra vrifthållare och fotremmar kan ej monteras på fotplattan utan specialanpassning

2-punkts Höftbälte

Anatomic Sitts universalfäste 386 skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 386
Universalfäste support
höftbälten 40 mm,
M8 (2 st)



Triglide-spännen som
medföljer bältet.

4-punkts Höftbälte och Antirotationsbälte

Främre bandet: Anatomic Sitts universalfäste 371911 skruvas i ett av befintliga skruvhål på sidan av sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.

Bakre bandet: Använd Anatomic Sitts universalfäste 371911 som skruvas i ett av befintliga skruvhål under sitsen enligt bild. Trä höftbältet genom universalfästet och använd fästmetoden med triglide-spännet som medföljer bältet.



Monteringstillbehör



Art nr 371911
Universalfäste Support
höftbälten 25 mm,
M8 (4 st)



Triglide-spännen som medföljer bältet.

Bålselar, vrishållare och fotremmar

Våra produkter kan inte monteras på denna stol utan specialanpassningar.