

SORTIMENT: Gånghjälpmedel

Upphandlingen gällande gånghjälpmedel är färdig. Information om det nya sortimentet kommer att ges på våra sortimentsvisningar under november och december.

Håll utkik här: [Kalender](#)

Felaktig fakturering korrigeras i efterhand

I samband med införande av nytt inköpsavtal har vissa rollatorer och gåbord fakturerats med för hög hyra under augusti. Detta kommer att korrigeras så snart som möjligt.

SÄKERHET: Hygienstol

Hållbarhet ifrågasatt när beräknad livslängd passerat

Det har på sista tiden uppmärksammats att rygglädseln på duschstolen Sorrento från Invacare blir skörare och tappar i kvalitet med åren, vilket gör att den kan brista. Sorrento duschstol har enligt bruksanvisningen en beräknad livslängd på tre år.

Hjälpmedel Västerbotten har inte Sorrento duschstol i sortiment. Den såldes av oss fram till 2018, men vi har ingen möjlighet att spåra var dessa duschstolar finns idag. En uppmaning till er förskrivare är att vara uppmärksamma vid alla givna tillfällen, som exempelvis vid hembesök, och informera användaren och dennes nätverk om att rygglädsels funktion med tiden kan försämrans.



TIPS: Lagar och regelverk

Får jag flytta en monteringsarm med en telefon mellan säng och rullstol?

Får jag kombinera två leverantörers hjälpmedel, till exempel ett nackstöd från en manuell rullstol på en hygienstol?

Får jag ha en rullstolsdyna i en fåtölj?

Vad är viktigt att få med i en anvisning för en specialanpassad produkt?

Var hittar jag avsedd användning i bruksanvisningen för en hjälpmedelsprodukt?

Fråga oss om MDR

Har du frågor och funderingar om EU:s nya förordning om medicintekniska produkter (MDR) eller andra lagar och regelverk för hjälpmedel? Skicka ett mejl vår MDR-grupp så hjälper vi dig att tolka regelverken. Gruppen träffas regelbundet för att gå igenom och besvara inkomna frågor.

Skicka dina frågor till oss på adressen: hmvm.dr@regionvasterbotten.se

TIPS: Tryckavlastande madrass



När en madrass larmar om läckage är det ibland så enkelt att CPR-ventilen inte är ordentligt stängd.

Kolla CPR-ventilen innan du skickar iväg madrassen

Har du varit med om att en madrass med pump larmar för läckage? Något som kan vara värt att kontrollera innan madrassen skickas in för lagning/byte, är att CPR-ventilen sitter fast ordentligt. Några av de felanmälda madrasser som vi trycktestat har det inte varit något fel på, men CPR-ventilen har varit ur position. Om det här upptäcks i tid är det lätt åtgärdat på plats och kan bespara dig och framför allt användaren en del besvär.

Säkerhetsmeddelande: Uppressningsstöd Eva

Eva består av en golvplatta med fästen samt en bygel. Vid infästning av bygel i golvplatta används monteringskruvar som säkrar bygel i plattan. På produkter levererade av Swereco innan 25 maj 2020 har skruven en utstickande skruvskalle, som för att minimera risken för skada hos användaren ska bytas ut mot en invändig stoppskruv.

Önskar du ersättningsprodukter för detta, kontakta kundtjänst.

