

Nytt transportmedium för *Helicobacter pylori* - odlingsdiagnostik

Helicobacter pylori är en transportkänslig bakterie. Vi kan nu tillhandahålla ett nytt transportmedium för endoscopiskt tagna prover från t.ex. antrumslemhinna; Portagerm pylori (liten flaska märkt PORT-PYL) som visat goda resultat avseende överlevnad av bakterien vid testning på laboratoriet.

Transportmediet kan hämtas eller rekvireras från Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

- Mediet/Port-Pyl-flaskan förvaras i kyl före provtagning.
Låt gärna Port-Pyl-flaskan rumstempereras före provtagning.
- Biopsin trycks med en steril nål 0,5 - 1 cm under agarytan och locket stängs genast.

Viktigt med snabb transport till laboratoriet!



Se även provtagningsanvisningarna för odlingsdiagnostik av *Helicobacter pylori* i <https://webappl.vll.se/provtagningsanvisningar>.