

22 november 2021

Påminnelse - Viktigt säkerhetsmeddelande - Aquatec Ocean VIP - Dusch och toalettstol

För användares säkerhet vill vi uppmärksamma er på följande:

Med hänsyn till användarnas säkerhet vill vi uppmärksamma er på korrekt installation och användning av Ocean VIP och dess säkerhetsvarningsetiketter (som finns att beställa) se bruksanvisningen.

Vi vill särskilt påminna er om att man kan få en viktning/tiltning av stolen framåt, om hjulen är positionerade/riktade bakåt och användaren placerar sin kroppstyngd framåt och/eller står på fotplattan. Samtidigt vill vi påminna om möjligheten att komplettera hjälpmedlet med tillbehöret tippskydd.



Under utvecklingen av en ny produkt utförs validering och verifiering för att säkerställa att produkten uppfyller internationella standarder och fungerar som avsett. Produkten uppfyller stabilitetskraven i enlighet med testkraven i EN 12182. Eftersom det har förekommit några incidenter relaterade till tippning, särskilt framåt, av hjälpmedlet, vill Invacare påminna om att korrekt installation och användning av hjälpmedlet, är obligatoriskt.

För att säkerställa god prestanda och säkerhet, får produkten endast användas i enlighet med dess avsedd användning och instruktionerna som finns i bruksanvisningen måste följas. Instruktionerna som medföljer denna produkt måste läsas och förstås innan produkten används. Dessutom bör produkten kontrolleras för skador innan den tas i bruk. Om någon skada eller felfunktion upptäcks får produkten inte användas.

Den avsedda användningen och livslängd för Ocean VIP anges i användarmanualen och definieras enligt följande:

Dusch- och toalettstolen är endast avsedd som ett hjälpmedel vid duschning, toalettbesök eller förflyttning av patienter i inomhusmiljö. All annan användning är förbjuden.

Vi uppskattar en förväntad livslängd på fem år för dessa produkter, förutsatt att de används i strikt överensstämmelse med den avsedda användningen som anges i dokumentationen och allt underhåll och servicekraven är uppfyllda.

Användarmanualen innehåller, bland annat, följande säkerhetsrelevanta information, särskilt om risken för tippning och tillgången till tippskydd för att förhindra tippning.

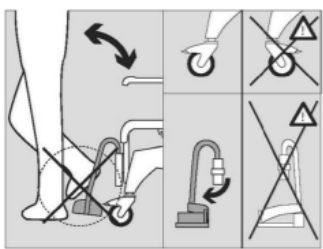
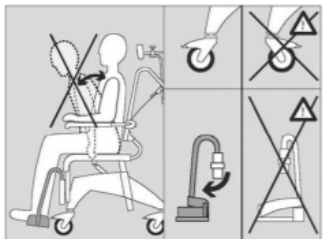
Avsnitt 2 - Säkerhet

! **WARNING!**
Risk för personskador

- Använd inte produkten om den är defekt.
- Kontakta genast din återförsäljare i händelse av fel.
- Försök inte laga eller utföra obehöriga ändringar av produkten.
- Använd endast tillbehör som är avsedda för denna produkt.

Avsnitt 2.2 - Etiketter och symboler på produktidentifieringsetiketten

Följande etiketter sitter på sidodelarna:

Etikett	Beskrivning
	<p>WARNING! Risk för att välta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kliv inte på fotstödet när du sätter dig eller reser dig från dusch- och hygienstolen. - Skjut fotstöden åt sidan eller fäll upp fotplattorna innan du sätter dig eller reser dig från dusch- och hygienstolen. - Innan du sätter dig eller reser dig ska du vrida hjulen så att spärren pekar framåt.
	<p>WARNING! Risk för att välta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luta dig inte för långt framåt när du sitter på dusch- och hygienstolen. - Fäst främre tippskydd.

Etiketterna har artikelnummer:

1575252

Varningsetikett benstöd/kroppslutning

1575253

Varningsetikett tiltning

5.1 Säkerhetsinformation



VARNING!

- Använd endast dusch- och hygienstolen på plana ytor och inomhus.
- Observera specifikationerna på märkplåten. Överbelasta inte dusch- och hygienstolen.
- Observera säkerhetsetiketterna på baksidan av huvudstödet och sidodelarna, 2.2 Etiketter och symboler på produkten, sida 7.
- Placera inte överdrivet hög vikt på dusch- och hygienstolen.
- Utför alltid en visuell inspektion av produkten beträffande externa skador före varje användningstillfälle.



VARNING!

Risk för halkning och rullning

- Före användning ska du kontrollera att sitsen sitter fast ordentligt på sittramen.
- Lås alla fyra hjulen med de röda fotspakarna innan du sätter dig eller reser dig från hygienstolen samt i parkeringsläget.



VARNING!

Risk för att välta

- Sväng fotstöden åt sidan eller fäll upp fotplattorna innan du sätter dig eller reser dig.
- Innan du sätter dig eller reser dig ska du vrida hjulen så att spärren pekar framåt.
- Stå aldrig på fotstöden.
- Brukaren får endast köras i hygienstolen om sittramen och ryggstödet är låsta i upprätt läge.
- Ta aldrig loss gasfjädrarna.



VARNING!

Risk för att välta framåt!

- Främre tippskydd (artikelnr 1535936) finns tillgängliga för att förhindra att dusch- och hygienstolen tippas framåt.

7.1 Säkerhetsinformation

Produkten är underhållsfri förutsatt att rengörings- och säkerhetsinstruktionerna ovan följs.



VARNING!

- Kontrollera produkten regelbundet beträffande skador och för att säkerställa att alla skruvar är ordentligt åtdragna samt att produkten är ordentligt monterad.



Vi vill uppmärksamma er om att det finns möjlighet att montera tippskydd på framsidan (se bild) för användare som har behovet att förhindra att duschstolen tillas framåt.

Tillbehöret; Tippstöd fram par (artikelnr; 1535936) kan beställas för alla Aquatec® Ocean VIP, Ocean VIP XL och Ocean Dual VIP, mobila duschstolar.

Skulle osäkerhet uppstå om hur produkten ska användas, kontrolleras och installeras, se bruksanvisning.

Bruksanvisning (artikelnr; 1563143; språk: SV, FI, NO, DA, LV, CS)

Om du har några frågor angående detta säkerhetsmeddelande, eller skulle behöva ytterligare information, vänligen kontakta Invacare kundservice:

Tel. : 08-761 70 90

Fax. : 08-761 81 08

E-post: sweden@invacare.com