

Säkerhetsmeddelande: Uppresningsstöd Eva

Uppresningsstödet Eva består av två delar; en golvplatta med fästen samt en bygel.
Vid infästning av bygel i golvplatta används monteringskruvar som säkrar bygeln i plattan.

På produkter **levererade av Swereco innan 25 maj 2020** har skruven en utstickande skruvskalle (se bild). För att minimera risken för skada hos användaren ska skruv med utstickande skruvskalle bytas ut mot en invändig stoppskruv (se bild).



Produkter levererade efter 25 maj 2020 berörs ej, då en produktförändring gjordes.

Önskar du erhålla ersättningsprodukter för att byta ut dessa detaljer, vänligen kontakta:

Marina Bergström, hjälpmedelskonsulent Hjälpmedel Västerbotten

090-785 70 41

marina.bergstrom@regionvasterbotten.se