



I-STAT KVALITETSSÄKRING - SIMULATORTEST


1. Starta  i-STAT instrumentet och TRYCK på följande:

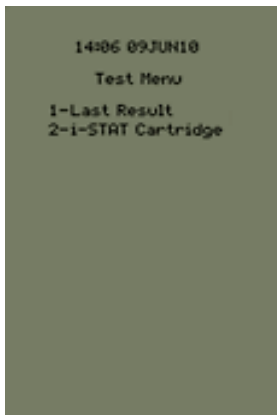

 Meny

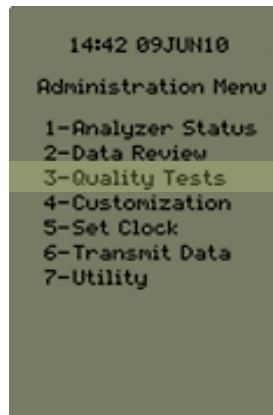


 Kvalitetstest

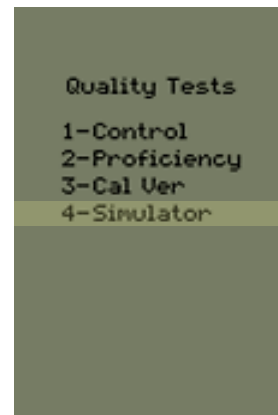

 Simulator

2. När instrumentet frågar efter:

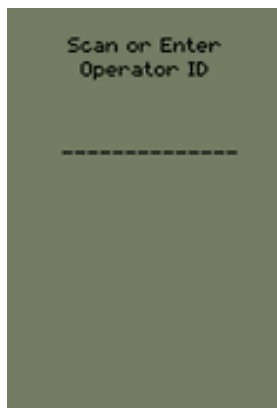

- Användar-ID tryck
- Simulator-ID tryck



3. Sätt in simulatorn enligt bilden!



Ta ALDRIG ut simulatorn när texten "SIMULATOR LÅST" syns i displayen! Det kan förstöra instrumentet!

För att kontrollera när senaste simulatortestet var utfört starta  i-STAT och TRYCK:

 Meny

 Granska data

 Simulator

I-STAT – Analys av patientprov

1. Starta  i-STAT instrumentet och TRYCK på :  I-STAT kassett

2. Följ instruktionerna på skärmen och Skanna  in följande:



Användar-ID eller skriv in och tryck





Patient ID eller skriv in (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) och tryck






Kassettpåsens LOTnr

Håll i sidan av kassettpåsen



3. Instrumentet väntar på kassett i 15min.

15
MINUTES

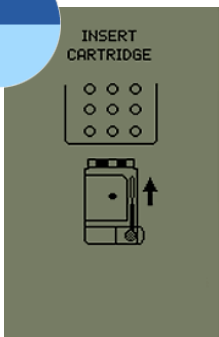

Öppna kassettpåsen!


Påminnelse i preanalys:

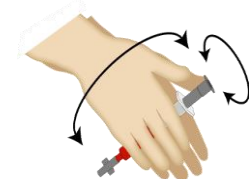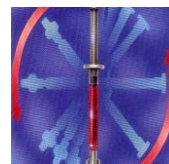

- Blanda **igen** direkt före analys!
- Tryck ut blodet som finns i spetsen!

4. Analysera!

Påminnelse i kassetthantering:

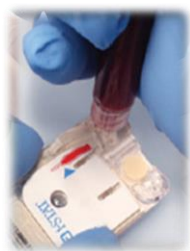

- Fyll till fyllnadsmärket!
**UNDVIK RÖRA SENSORER
och MITTEN AV KASSETTEN**
- Håll i sidorna av kassetten



- Tryck längst ut när du stänger locket



- Analysera!



**Ta ALDRIG ut Kassetten när texten "KASSETT LÅST" syns i displayen!
Det kan förstöra instrumentet!**