



Utföra AccuChek® kontrolltest




I fönstret Huvudmeny trycker du på knappen **Kontrolltest**.

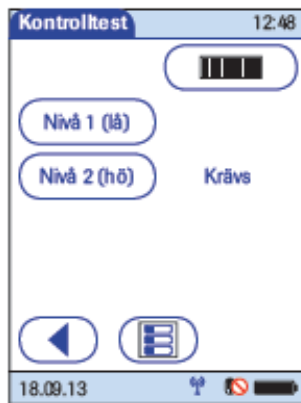

Tryck på Nivå 1 (låg) eller Nivå 2 (hög) för att välja nivå för efterföljande test.

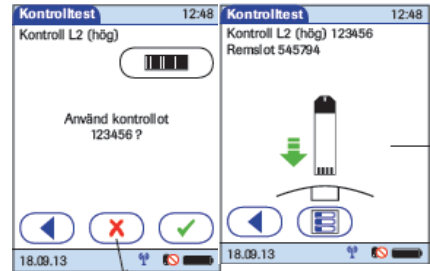

Bekräfta testremseloten. Om den är korrekt trycker du på . Du uppmanas att sätta in testremsan. Om den är felaktig trycker du på och väljer en annan lot

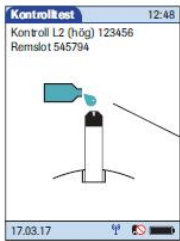

Applicera en droppe glukoskontrollösning på **testremsans framkant**. Applicera inte kontrollösningen längst upp på remsan. Kontrollösningen dras in i testremseområdet genom kapillärkraft.


När mätaren har kontrollerat testremsan uppmanas du att applicera kontrollösningen

När en tillräcklig mängd kontrollösning har detekterats avger mätaren en signal och mätningen startar.



När testet har slutförts och resultatet är färdigt avger mätaren en signal. Acceptera resultatet med eller tryck på för att lägga till en kommentar. Tryck på knappen **Intervall** för att se det specifikt kontrollintervall

Utföra extern kontrolltest (avstämningstest)

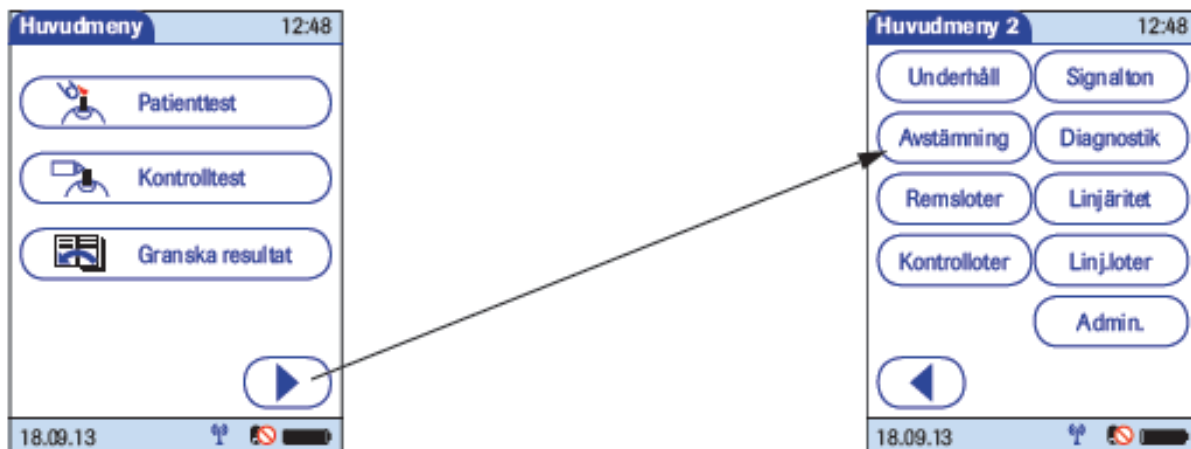

Tryck på knappen



I Huvudmeny öppnas fönstret
Huvudmeny 2.

Tryck på knappen **Avstämning** så
startas avstämningstestet

Följ sedan instruktionen för ett
patientprov.